

## Information der **martens**-Hotline zum Update auf SanaCheck® 5.2

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,

wir freuen uns, Ihnen hiermit das Update auf die Version 5.2 des Programms SanaCheck® überreichen zu können. Die wichtigsten Neuerungen sind im folgenden erläutert.

### **Qualitätskontrolle der Mess- und Analysegeräte**

Ein Erinnerungs-Assistent erinnert Sie nach einem von Ihnen festgelegten Zeitraum, dass die Geräte-Qualitätskontrolle fällig ist. Das Ergebnis der Qualitätskontrolle lässt sich geräte- und parameterspezifisch im Programm abspeichern. Gleich nach dem ersten Programmstart erhalten Sie eine entsprechende Information samt weiterführenden Hinweisen.

### **Gewichtstest**

- Für die gesundheitliche Bewertung des Übergewichts verliert BMI zusehends an Bedeutung, während die Beurteilung des Taillenumfangs bzw. der Fettverteilung wichtiger wird. Deshalb wird beim Gewichtstest jetzt zusätzlich der Bauchumfang bei Erwachsenen ausgewertet.
- Wie bislang schon bei Erwachsenen erhalten Sie jetzt auch bei Kindern einen Hinweistext zum weiteren Vorgehen bei Übergewicht.
- Diverse Ergebnistexte wurden aktualisiert.

### **Parametergruppen**

In der Parametergruppe Cholestech wurde das Verhältnis LDL/HDL ergänzt.

### **Laborwerte-Lexikon**

- Direkt aus dem Laborwerte-Lexikon heraus lassen sich jetzt über einen Button die Referenz-/Normalwerte nachschlagen.
- Aktualisiert wurden folgende Patienteninformationen: Albumin im Urin, Blutdruck, Cholesterin, CRP/hs-CRP, Ferritin, HbA1c, HDL, Homocystein, LDL und PSA.

### **Sonstiges**

- Erweiterungen beim online-Update
- diverse Ergebnistexte überarbeitet
- Fax-Bestellschein aktualisiert
- Im Zweig Texte finden Sie einen fertigen Vordruck für Ihre interne Qualitätsdokumentation.
- Die Programmhilfe wurde ergänzt und aktualisiert. Schauen Sie doch mal rein!
- Es wurden umfangreiche Anpassungen an moderne Hardware- und Betriebssystemversionen innerhalb der Software vorgenommen.

## **Folgende Neuerungen wurden zwischenzeitlich als online-Update ausgeliefert**

Wer Updates auf CD-ROM bezieht, erhält sie jetzt mit diesem CD-Update:

### **Unterstützung der Cholestech LDX Version 3.30**

Ab jetzt arbeitet SanaCheck auch mit der Version 3.30 des Cholestech LDX-Gerätes zusammen. Damit die Datenübertragung zwischen Gerät und SanaCheck klappt, muß in SanaCheck die richtige Cholestech-Version eingestellt werden. Diesen Eintrag nehmen Sie folgendermaßen vor:

- Öffnen Sie den Menüpunkt „Systemverwaltung“.

- Wählen Sie im Untermenü „Geräte, Einheiten, nüchtern-Default“.
- Öffnen Sie dort die Karteikarte „Cholestech-Gerät“.
- Wählen Sie aus der Dropdown-Box zur Firmware die Version 3.30.
- Schließen Sie das Fenster. Ihre Einstellungen werden dabei automatisch gespeichert.

#### **Neu: Parameter hs-CRP**

In dem Bildschirm, in dem Sie die ermittelten Messwerte eintragen/bzw. vom Gerät holen, finden Sie jetzt neu den Parameter hs-CRP (hochsensitives CRP), das sich mit der neuen Cholestech-Version ermitteln lässt.

Für diesen neuen Parameter wurden ebenfalls erfasst:

- die Normal-/Referenzwerte für die Methode „Cholestech“
- passende Ergebnistexte für den Ergebnisbericht
- Grunddaten für den grafischen Werteverlauf.

#### **Parametergruppe „Cholestech“ geändert**

In die Parametergruppe „Cholestech“ wurde der neue Parameter hs-CRP hinzugefügt.

Suchen Sie Bedienungshinweise?  
Dann schauen Sie doch einmal in die Programmhilfe.  
Dort ist alles Wissenswerte zusammengetragen.

Für ergänzende Rückfragen stehen wir Ihnen immer gerne zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg mit dem Programm.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr mephasoft-Entwicklungs-Team von  
martens – medizinisch-pharmazeutische software gmbh

## **Nutzen Sie das Online-Update?**

### **Nein?**

#### **Dann wird's aber Zeit! Denn das hat folgende Vorteile für Sie:**

- Sie sparen Geld  
Denn das online-Update ist wesentlich kostengünstiger. Schließlich brauchen dafür keine CDs mehr erstellt und Päckchen in Handarbeit gepackt und versandt zu werden.
- Sie sparen noch mehr Geld  
Denn Sie erhalten - nach diesem CD-Update-Bezug - alle online-Updates bis zum Jahresende gratis!
- Sie sparen Zeit  
Sie „drücken“ nur noch auf den „berühmten Knopf“ und alles geht von selbst – ohne dass Sie eine CD einlegen oder Ähnliches. Ruckzuck ist alles von allein fertig.
- Ihre Daten sind brandaktuell  
Denn sobald sich einige Datenänderungen angesammelt haben, stehen Ihnen diese postwendend per online-Update zur Verfügung.
- Ihr Programm ist brandaktuell  
Denn sobald ein Service-Pack vorliegt oder eine größere Programmaktualisierung, steht sofort alles für Sie zum Download bereit.

#### **Wie entscheiden Sie? CD-Update oder online-Update?**

Natürlich haben Sie die Wahl, ob Sie nach wie vor einmal pro Jahr per CD oder laufend per online-Update aktualisieren möchten.

#### **Wenn Sie am online-Update teilnehmen möchten (was wir empfehlen)...**

dann brauchen Sie nur die online-Update-Bestellung aus dem Programm heraus auszudrucken und uns ausgefüllt zuzufaxen. Und schon geht's los!

## Installation des Updates

Damit Ihnen (für alle Fälle) nach der Installation der neuen Version auch noch die alte mit Ihren Daten zur Verfügung steht, empfehlen wir folgendes Vorgehen:

1. Datensicherung erstellen
2. Update installieren

### 1. Datensicherung erstellen

Sie finden diese Funktion im Menü unter „Systemverwaltung“ und dort unter „Datensicherung – Sicherung erstellen“. Nähere Hinweise zur Datensicherung finden Sie in der Programmhilfe.

### 2. Update installieren

**Wichtig:** Bitte prüfen Sie als erstes, ob auf Ihrem Rechner die Vorgängerversion 5.1 installiert ist. Andernfalls läßt sich dieses Update nicht einspielen! Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, legen Sie die CD-ROM ins CD-ROM-Laufwerk. Das Installationsprogramm startet automatisch, sofern in Ihrem System die Autostart-Funktion aktiv ist. Andernfalls rufen Sie bitte auf:

**[Start]** -Button in der Taskleiste, Untermenü: **[Ausführen]**

In der Befehlszeile geben Sie dann ein: **x:setup**

Ersetzen Sie **X**: bitte durch die Kennung Ihres CD-ROM-Laufwerkes!

Klicken Sie dann auf **[OK]**

Das Installationsprogramm startet nun und führt Sie durch die Installation. Es verwendet dabei automatisch das Verzeichnis, in dem Ihre SanaCheck<sup>®</sup>-Version steht. Falls das Installationsprogramm das Zielverzeichnis nicht finden kann, erhalten Sie eine Meldung, mit der Sie die automatische Suche starten können:

Automatische Suche

Wenn Sie das Zielverzeichnis kennen, empfiehlt es sich, die automatische Suche abzuschalten (Häkchen durch Anklicken löschen), weil dieser Vorgang insbesondere in großen Netzwerken sehr zeitintensiv sein kann. Geben Sie in diesem Fall das Zielverzeichnis von Hand ein.

#### ➔ **Wichtiger Hinweis zur Installation des Updates im Netz!**

Bei diesem Updates werden neue Programm-Dateien auf dem Rechner installiert. Deshalb ist es erforderlich, dass das Update auf jedem Arbeitsplatz installiert wird, der mit SanaCheck<sup>®</sup> arbeitet.

Nach dem Einspielen des Updates auf dem ersten Rechner werden bei den folgenden lediglich ein paar Einträge nachgeholt, so dass das Einspielen erheblich rascher erfolgt. Achten Sie darauf, dass Sie als Ziel der Installation immer dasselbe Verzeichnis auf dem Server angeben!

Haben Sie ergänzende Fragen? Wir sind für Sie da:

### **martens**-Hotline

**Email:** info@martens.de


**Internet:** www.martens.de

**Fax:** 0 91 26/27 85 60

**Telefon:** 0 91 26/27 85 50, Mo-Fr 9.00 bis 13.00 Uhr (keine Hotline vom 27.12.05 bis 06.01.06)

## Tipps zum Finden von Informationen in der Programmhilfe

Zum Öffnen der Programmhilfe haben Sie zwei Möglichkeiten:

1. über den Button  **Hilfe**
2. über den Hauptmenüpunkt [Hilfe] und im zugehörigen Untermenü [Inhalt].

Sie können dann über folgende Karteikarten in der Hilfe suchen:

1. **Inhalt**  
Das Inhaltsverzeichnis sehen Sie als Baumstruktur sofort nach dem Starten der Programmhilfe. Wählen Sie gewünschte Einträge durch Anklicken aus.
2. **Index**  
Den Index öffnen Sie durch Klick auf den unteren Karteireiter „Index“.
3. **Suchen**  
Geben Sie ein Schlüsselwort ein. Es werden daraufhin entsprechende Fundstellen gelistet.