

Information der **martens**-Hotline zum Update auf SanaCheck® 5.3

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,

wir freuen uns, Ihnen hiermit das Update auf die Version 5.3 des Programms SanaCheck® überreichen zu können. Die wichtigsten Neuerungen sind im folgenden erläutert.

Gerätekontrolle mit Datenübertragung

Bei der Gerätekontrolle für das Cholestech-Gerät lassen sich jetzt die Daten der Optik-Kassette vom Gerät übertragen und speichern.

Neue Parameter

Berechnet und ausgewertet wird jetzt die Blutdruck-Amplitude, allerdings nur für Patienten über 50 Jahren.

Speichermöglichkeit für anonyme Messungen

Daten anonymer Messungen lassen sich jetzt nachträglich einem Patienten zuordnen. Neue Patienten können nachträglich angelegt werden.

Datenaktualisierungen

52 Aktualisierungen erfolgten innerhalb der Indikationstexte. Gicht und Krampfadern sind komplett überarbeitet.

Im Laborwerte-Lexikon ergaben sich 14 Änderungen.

Programmverbesserungen/Sonstiges

- aktualisierte QS-Formulare für das Einspielen des Updates
- überarbeitete Programmhilfe
- Automatisierung beim Einspielen von Updates
- Programmanpassungen an aktuelle Hard- und Softwareumgebungen

Folgende Neuerungen wurden zwischenzeitlich als online-Update ausgeliefert

Wer Updates auf CD-ROM bezieht, erhält sie erst jetzt mit diesem CD-Update:

Unterstützung der FUTREX-Körperfett-Messung

Für die FUTREX-Körperfett-Messung wurde eine separate Methode mit eigenen Normalwerten und Ergebnis-Kommentaren für Kinder und Erwachsene hinterlegt. Wer diese nutzen möchte, nimmt die nötigen Einstellungen wie folgt vor:

- Öffnen Sie die „Systemverwaltung“
- Wählen Sie im zugehörigen Untermenü „Normal-/Referenzwerte“
- Wählen Sie aus der Liste den Parameter „Körperfett in %“
- Stellen Sie beim Körperfett die Methode „FUTREX“ ein.
- Setzen Sie durch einmaliges Anklicken ein Häkchen hinter „voreingestellte Methode“
- Klicken Sie auf „Speichern“.

Datenaktualisierungen

Es wurden 11 Indikationen und 3 Laborwert-Informationen aktualisiert. Neu hinzugekommen ist im Laborwerte-Lexikon der Parameter Bauchumfang.

Neue Programmhilfe

Die Programmhilfe wurde überarbeitet und für eine Kompatibilität mit dem Internet Explorer 7.0 gesorgt. Die neue Hilfedatei wird mit diesem Update ausgeliefert.

Programmverbesserungen

Änderungen erfolgten beim

- Erinnerungsassistenten für die Qualitätskontrolle der Messgeräte und
- automatischen Start des Internet-Update Programms, wenn zuvor eine Update-Installation abgebrochen wurde.
- Ergebnisbericht der Körperfett-Messung
- Druck aus dem Laborwerte-Lexikon. Diese Ausdrücke können jetzt auch mit Mitarbeiter-, Saison- und Zusatztexten versehen werden.

Suchen Sie Bedienungshinweise?
Dann schauen Sie doch einmal in die Programmhilfe.
Dort ist alles Wissenswerte zusammengetragen.

Für ergänzende Rückfragen stehen wir Ihnen immer gerne zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg mit dem Programm.

Mit freundlichen Grüßen

martens – medizinisch-pharmazeutische software gmbh



Dr. Frauke Martens

Nutzen Sie das Online-Update?

Nein?

Dann wird's aber Zeit! Denn das hat folgende Vorteile für Sie:

- **Sie sparen Geld**
Denn das online-Update ist wesentlich kostengünstiger. Schließlich brauchen dafür keine CDs mehr erstellt und Päckchen in Handarbeit gepackt und versandt zu werden.
- **Sie sparen noch mehr Geld**
Denn Sie erhalten - nach diesem CD-Update-Bezug - alle online-Updates bis zum Jahresende gratis!
- **Sie sparen viel Zeit**
Sie „drücken“ nur noch auf den „berühmten Knopf“ und alles geht von selbst – ohne dass Sie eine CD einlegen oder Ähnliches. Ruckzuck ist alles ganz von allein fertig.
- **Ihre Daten sind brandaktuell**
Denn sobald sich einige Datenänderungen angesammelt haben, stehen Ihnen diese postwendend per online-Update zur Verfügung.
- **Ihr Programm ist brandaktuell**
Denn sobald ein Service-Pack vorliegt oder eine größere Programmaktualisierung, steht sofort alles für Sie zum Download bereit.

Wie entscheiden Sie? CD-Update oder online-Update?

Natürlich haben Sie die Wahl, ob Sie nach wie vor einmal pro Jahr per CD oder laufend per online-Update aktualisieren möchten.

Wenn Sie am online-Update teilnehmen möchten (was wir empfehlen)...

dann brauchen Sie nur die online-Update-Bestellung aus dem Programm heraus auszudrucken und uns ausgefüllt zuzufaxen. Und schon geht's los!

Installation des Updates

Damit Ihnen (für alle Fälle) nach der Installation der neuen Version auch noch die alte mit Ihren Daten zur Verfügung steht, empfehlen wir folgendes Vorgehen:

1. Datensicherung erstellen
2. Update installieren

1. Datensicherung erstellen

Sie finden diese Funktion im Menü unter „Systemverwaltung“ und dort unter „Datensicherung – Sicherung erstellen“. Nähere Hinweise zur Datensicherung finden Sie in der Programmhilfe.

2. Update installieren

Wichtig: Bitte prüfen Sie als erstes, ob auf Ihrem Rechner die Vorgängerversion 5.2 installiert ist. Andernfalls läßt sich dieses Update nicht einspielen! Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, legen Sie die CD-ROM ins CD-ROM-Laufwerk. Das Installationsprogramm startet automatisch, sofern in Ihrem System die Autostart-Funktion aktiv ist. Andernfalls rufen Sie bitte auf:

[Start] -Button in der Taskleiste, Untermenü: **[Ausführen]**

In der Befehlszeile geben Sie dann ein: **x:setup**

Ersetzen Sie **X**: bitte durch die Kennung Ihres CD-ROM-Laufwerkes!

Klicken Sie dann auf **[OK]**

Das Installationsprogramm startet nun und führt Sie durch die Installation. Es verwendet dabei automatisch das Verzeichnis, in dem Ihre SanaCheck[®]-Version steht. Falls das Installationsprogramm das Zielverzeichnis nicht finden kann, erhalten Sie eine Meldung, mit der Sie die automatische Suche starten können:

Automatische Suche

Wenn Sie das Zielverzeichnis kennen, empfiehlt es sich, die automatische Suche abzuschalten (Häkchen durch Anklicken löschen), weil dieser Vorgang insbesondere in großen Netzwerken sehr zeitintensiv sein kann. Geben Sie in diesem Fall das Zielverzeichnis von Hand ein.


Haben Sie ergänzende Fragen? Wir sind für Sie da:

martens-Hotline

Email: info@martens.de
Internet: www.martens.de
Fax: 0 91 26/27 85 60
Telefon: 0 91 26/27 85 50, Mo-Fr 9.00 bis 13.00 Uhr

Tipps zum Finden von Informationen in der Programmhilfe

Zum Öffnen der Programmhilfe haben Sie zwei Möglichkeiten:

1. über den Button  **Hilfe**
2. über den Hauptmenüpunkt [Hilfe] und im zugehörigen Untermenü [Inhalt].

Sie können dann über folgende Karteikarten in der Hilfe suchen:

1. **Inhalt**
Das Inhaltsverzeichnis sehen Sie als Baumstruktur sofort nach dem Starten der Programmhilfe. Wählen Sie gewünschte Einträge durch Anklicken aus.
2. **Index**
Den Index öffnen Sie durch Klick auf den unteren Karteireiter „Index“.
3. **Suchen**
Geben Sie ein Schlüsselwort ein. Es werden daraufhin entsprechende Fundstellen gelistet.