

# Information der **martens**-Hotline zum Update auf SanaCheck<sup>â</sup> 5.1.3

## Die wichtigsten Neuerungen:

### Unterstützung der Cholestech LDX Version 3.30

Ab jetzt arbeitet SanaCheck auch mit der Version 3.30 des Cholestech LDX-Gerätes zusammen. Damit die Datenübertragung zwischen Gerät und SanaCheck klappt, muß in SanaCheck die richtige Cholestech-Version eingestellt werden. Diesen Eintrag nehmen Sie folgendermaßen vor:

- Öffnen Sie den Menüpunkt „Systemverwaltung“.
- Wählen Sie im Untermenü „Geräte, Einheiten, nüchtern-Default“.
- Öffnen Sie dort die Karteikarte „Cholestech-Gerät“.
- Wählen Sie aus der Dropdown-Box zur Firmware die Version 3.30.
- Schließen Sie das Fenster. Ihre Einstellungen werden dabei automatisch gespeichert.

### Neu: Parameter hs-CRP

In dem Bildschirm, in dem Sie die ermittelten Messwerte eintragen/bzw. vom Gerät holen, finden Sie jetzt neu den Parameter hs-CRP (hochsensitives CRP), das sich mit der neuen Cholestech-Version ermitteln lässt.

Für diesen neuen Parameter wurden ebenfalls erfasst:

- die Normal-/Referenzwerte für die Methode „Cholestech“
- passende Ergebnistexte für den Ergebnisbericht
- Grunddaten für den grafischen Werteverlauf.

### Parametergruppe „Cholestech“ geändert

In die Parametergruppe „Cholestech“ wurde der neue Parameter hs-CRP hinzugefügt.